

# DESIFOR-forte AF (ДЕСИФОР-форте АФ)

Жидкий концентрат для очистки и дезинфекции поверхности

**vileda**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для очистки и превентивной дезинфекции водостойких поверхностей и пола при ежедневной уборке в медицинских учреждениях и на пищевых производствах. Не содержит альдегиды. DESIFOR-forte AF убивает бактерии, в том числе, резистентный золотистый стафилококк, грибки, микробактерии туберкулеза, а также обладает лимитированным вирулицидным и деактивирующим действие на бактерии норовирусов. В соответствии с немецким законом об обработке медицинских приборов, DESIFOR-forte AF является рекомендованным средством, не содержащим альдегиды, для дезинфекции медицинских приборов. В соответствии с Директивой о биоцидных продуктах, данное средство рекомендуется для дезинфекции всех видов поверхностей и медицинского оборудования.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Обработайте поверхность DESIFOR-forte AF. Тщательно ополосните поверхность/приборы питьевой водой.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Область применения	Дозирование	Время реакции
Рекомендовано Ассоциацией Прикладной Гигиены Высокий уровень загрязнения Машинная уборка.	1% 0,5% / 0,25%	15 мин 60 мин / 4 часа
Краткосрочная дезинфекция	3% 2%	1 мин 5 мин
Лимитированное вирулицидное действие, в соответствии с рекомендациями RKI	1%	15 мин
Норовирусы	1%	2 часа
Вирус коровьей оспы	1%	15 мин
Ротавирусы	0,25%	15 мин
Полиомавирусы	1% / 0,5%	60 мин / 4 часа
Бактерия туберкулеза	0,5%	60 мин
Список DVG, часть А, при 20 °С Сильные загрязнения Слабые загрязнения	0,5% / 0,5% 0,75% / 0,5%	30 мин / 60 мин 30 мин / 60 мин

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Рекомендовано Ассоциацией Прикладной Гигиены
- Список DVG, часть A, при 20 °С
- Подходит для обработки не нагреваемых подкладных суден
- Не содержит альдегиды и фенол
- Соответствует европейской директиве 93/42/EWG для медицинских инструментов.

## ИНГРЕДИЕНТЫ

100гр раствора содержат: 16гр -бензил С8-18-алкил демитил, хлоридные четвертично аммониевые соединения, гуанидина, N,N"-1,3-пропан диилбис, производные алкила из кокосового масла. В соответствии с правилами Европейского Союза, содержать только биологические разлагаемые поверхностно-активные вещества.

Маркировка в соответствии с правилами обращения с опасными веществами: С-едкое; N-опасно для окружающей среды.

## рН концентрата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Наименование	Объем	Штук в упак.
20540	DESIFOR FORTE AF (Дезифор Форте АФ), 1 л	1	12
20542	DESIFOR FORTE AF (Дезифор Форте АФ), 1 л	5	1

Вся информация, содержащаяся в наших информационных листах, верна и находится в соответствии с нашим опытом и знаниями о выпускаемой продукции. Претензии на основе данной информации не принимаются.